

Avance® Solo

Praktický průvodce léčby ran podtlakovou terapií




Avance® Solo
Pacientská příručka


Mölnlycke®

Zahájili jste léčbu rány systémem podtlakové terapie Avance® Solo. V této příručce najdete základní informace o tom, jak zařízení používat.

Popis jednotlivých částí zařízení Avance® Solo

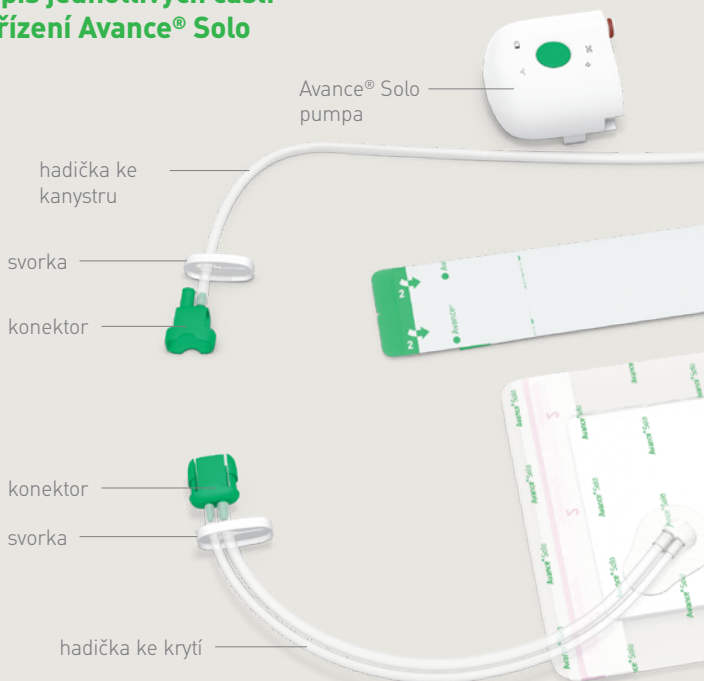

Co je podtlaková terapie (NPWT)?

Podtlaková terapie (NPWT) je metoda léčby ran pomocí sání. Obvaz je vzduchotěsný a pumpa vytváří podtlak, čímž z rány odvádí exsudát a čistí ji.

Jaké výhody přináší podtlakové terapie?


- Pomáhá podporovat hojení složitých a pomalu se hojících ran¹.
- Zlepšuje přípravu spodiny rány a tím podporuje hojení¹.
- Pomáhá snižovat otok a chrání ránu před vnější kontaminací².



Avance Solo kanistr 50ml



fixační pásy

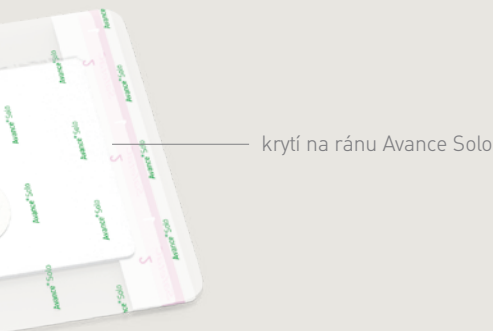

krytí na ránu Avance Solo

Na co je třeba pamatovat při používání Avance® Solo

Avance® Solo je zdravotnický prostředek a je důležité, abyste se o něj řádně starali.

Úplné pokyny, varování a bezpečnostní opatření naleznete v uživatelské příručce pro pacienta, která je součástí každého balení produktu.

Důležitá upozornění:

- Neměňte si krytí sami.
- Nevystavujte zařízení ani jeho části proudům vody nebo extrémním teplotám (ideální provozní teplota 5–40°C).
- Zařízení ani jeho části neponořujte do vody.
- Nepoužívejte v letadle. Při cestování letadlem vyjměte baterie.
- Zařízení nerozebírejte ani s ním jinak nemanipulujte.
- Zamezte dětem nebo domácím zvířatům v přístupu k zařízení.

Co je dobré vědět:

- Seznamte se s vizuálními a zvukovými signály, které oznamují špatnou těsnost, ucpání hadiček a vybité baterie. Viz strana 7.
- Pro bezproblémový chod zařízení je potřeba, aby pumpa pravidelně sála. To je provázeno pravidelnými pulzy. Tento zvuk je naprosto v pořádku a potvrzuje, že systém funguje správně.²⁻⁷ V případě, že by vás tento zvuk obtěžoval, je možné dodat noční pouzdro, abyste nebyli rušeni během spánku.
- Kontrolujte, zda je krytí na ráně napnuté a na dotek pevné. Pokud ne, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Při používání dbejte na to, aby:

- Se vám nezamotaly hadičky
- Při zasazení pumpy do přiložené spony na opasek tato spona držela pevně na opasku. Pokud pumpu na opasku nosíte vpředu, pak ji před usednutím vyjměte ze spony, abyste zabránili jejímu nechtěnému vypadnutí.

Jak zvládnout každodenní hygienu?

Můžete se sprchovat, ale dbejte na to, aby pumpa nepřišla do styku s vodou. Krytí na rány je voděodolné, přesto jej nevystavujte přímému proudu vody.


Při sprchování dodržujte následující postup:




Přerušete chod pumpy stisknutím a podržením zeleného tlačítka Start po dobu 2 sekund.



Zaškrťte hadičku kanystru a krytí posuvnými svorkami v blízkosti zeleného konektoru.

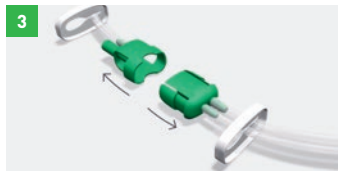

Rozpojte obě části zeleného konektoru a pumpu s kanystrem odložte mimo dosah sprchy.

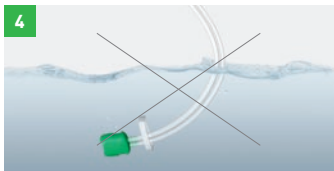

Dbejte na to, aby hadička od krytí nebyla ponořena do vody.



Po osprchování znovu propojte obě hadičky konektorem a uvolněte obě svorky.



Stisknutím a podržením tlačítka Start po dobu 2 sekund pumpu opět uvedete do chodu.

Udržba zařízení Avance® Solo

Výměna kanystru

V případě signalizace “blokování” zkontrolujte, zda je kanystř naplněný. Pokud jej chcete vyměnit, postupujte podle návodu níže. Výměnu kanystř si raději předem vyzkoušejte společně s lékařem.



Přerušte chod pumpy stisknutím a podržením zeleného tlačítka Start po dobu 2 sekund.



Zaškrťte hadičku kanystř a krytí posuvnými svorkami v blízkosti zeleného konektoru.



Uvolněte hadičku z úchyty na zadní straně pumpy. Kanystř odpojte stlačením pružných výstupků na obou stranách a poté jej vytáhněte. K pumpě připojte nový kanystř a zatlačte, dokud na obou stranách nezaklapne na své místo. Nezapomeňte zapojit hadičku kanystřu zpět do úchyty na zadní straně.



Znovu propojte obě hadičky konektorem a uvolněte obě svorky. Stisknutím a podržením tlačítka Start po dobu 2 sekund pumpu opět uvedete do chodu.

Výměna baterií

Obě baterie vyměňte po 7 dnech provozu nebo v případě signalizace.

Používejte pouze baterie určené pro tento produkt - AA 1,5V Energizer L91.

- Pokud pumpa stále pracuje, přerušete její chod stisknutím a podržením zeleného tlačítka Start po dobu 2 sekund.
- Otevřete přihrádku na baterie vysunutím víčka.
- Vyjměte baterie.
- Vložte nové baterie a ujistěte se, že kladný pól (označený +) a záporný pól (označený -) každé baterie souhlasí se štítkem +/- v prostoru pro baterie.
- Zavřete víčko prostoru pro baterie.
- Restartujte pumpu stisknutím a podržením zeleného tlačítka Start po dobu 2 sekund. Při správnem vložení baterií provede pumpa autotest a 3x zapípá.



Jak čistit zařízení

Pumpu lze čistit otřením vlhkým hadříkem nebo neabrazivním čisticím prostředkem. Pumpu v žádném případě nečistěte pod tekoucí vodou.



**Nezapomeňte navštívit webové stránky
Avance Solo!**

Najdete tam mimo jiné i instruktážní videa
k tématům z této brožury.



Odstraňování problémů

V průběhu léčby zařízením pro podtlakovou terapii Avance Solo je důležité, abyste věnovali pozornost zvukovým a vizuálním signálům, které může pumpa vydávat.

Signalizace možných problémů

ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ A VIZUÁLNÍ INDIKÁTOR		MOŽNÁ PŘÍČINA
	Světelný indikátor netěsnosti bliká jednou za sekundu. Pumpa vydává opakované pípnutí a její chod se poté zastaví.	System netěsní.
	Světelný indikátor blokování bliká jednou za sekundu. Pumpa vydává opakované pípnutí a její chod se poté zastaví.	Kanystr je plný nebo jsou zablokované hadičky.
	Světelný indikátor nízkého stavu baterie bliká jednou za 5 sekund. Pokud zbývá kapacita baterie na méně než 4 hodiny provozu, světelný indikátor nízkého stavu baterie bliká jednou za sekundu a pumpa vydává opakované pípnutí.	Baterie jsou téměř vybité.
	Všechny světelné indikátory blikají současně jednou za sekundu a pumpa opakovaně pípá.	Aktivuje se alarm vnitřní porucha a pumpu nelze spustit.

Poznámka: Pravidelný pulzující zvuk, který pumpa vydává, je zcela normální a je potvrzením, že systém funguje.

JAK ODSTRANIT PROBLÉMY

Pro odstranění netěsnosti:

Přitlačte okraje krytí a fixační pásky, aby lépe přilnuly ke kůži.

Zkontrolujte, zda je kanystr připojen k pumpě, zda je ke kanystru připojena hadička a že hadička krytí je propojená s hadičkou kanystru.

Pro restartování pumpy stiskněte zelené tlačítko.

Není-li únik tímto postupem odstraněn, pumpa opět aktivuje alarm a přeruší léčbu. V takové, případě kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře.

Pro odstranění blokování:

Zkontrolujte, zda hadičky nejsou zasvorkované nebo ohnuté.

Je-li kanystr plný, vyměňte jej podle pokynů uvedených v této brožuře.

Pro restartování pumpy stiskněte zelené tlačítko.

Není-li blokování tímto postupem odstraněno, pumpa opět aktivuje alarm a přeruší léčbu. V takovém případě kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře.

Výměna baterií:

Baterie vyměňte podle pokynů uvedených v této brožuře. Používejte pouze typ a model lithiových baterií doporučených pro toto zařízení. Pro restartování pumpy stiskněte zelené tlačítko.

Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Kontaktní údaje ošetřující ambulance:

Pumpa Avance® Solo, krytí a další příslušenství jsou zdravotnické prostředky.

Před použitím se poraďte s lékařem a čtěte pozorně Návod k použití.

www.molnlycke.cz

www.avancesolo.cz

www.osetreniran.cz

CE 2797

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3.
Mölnlycke Health Care, Safetac a Avance Solo jsou registrované
ochranné známky, názvy a loga jedné či více společností skupiny
Mölnlycke Health Care Group. © 2022 Mölnlycke Health Care AB.
Všechna práva vyhrazena. CZWC1440822


Mölnlycke®