

Granulox[®]

Hemoglobinový sprej na rány

...nastartuje hojení kyslíkem



Zdravotnický prostředek

CE 0482


Mölnlycke[®]
Váš partner v hojení ran

Granulox[®]

...nastartuje hojení kyslíkem

- ✓ Dodává kyslík do rány
- ✓ Stimuluje hojení o chronických ran
- ✓ Zkracuje dobu hojení
- ✓ Unikátní mechanismus účinku
- ✓ Jednoduchá aplikace
- ✓ Praktické balení

Granulox[®] je sprej na hojení ran s unikátním mechanismem účinku. Obsahuje čištěný hemoglobin, který okysličuje spodinu rány a tím aktivuje a podporuje hojící procesy.

Lze jej použít jako podpůrnou terapii při hojení všech druhů ran.



Největším problémem při hojení chronických ran je nedostatek kyslíku. Pokud nejsou tkáně dostatečně okysličené, vede to k prodloužení hojení a v mnoha případech se rány nehojí vůbec.



Granulox® hemoglobinový sprej

- ✓ Bércové vředy
- ✓ Vředy diabetických nohou
- ✓ Popáleniny
- ✓ Proleženiny
- ✓ Rány po operacích
- ✓ Lze použít i na povleklé nebo infikované rány

Aplikace



1. Ránu nejprve dobře opláchněte a zbavte nečistot a povlaků pomocí přípravku Granudacyn® oplachový roztok.
2. Nastříkejte sprej Granulox® krátce a rovnoměrně ze vzdálenosti 5-10 cm na ránu. Stačí velmi tenká vrstva pokrývající spodinu rány.
3. Otřete okraje rány aby na nich neulpěl přebytečný hemoglobin.
4. Překryjte sterilním prodyšným krytím, nejlépe např. Mepilex Border Flex nebo Mepilex XT.
5. Sprej aplikujte do rány v intervalu á 3 dny, ale lze i častěji.



V případě, že je rána příliš suchá, lze po aplikaci Granuloxu přidat do rány ještě zvlhčující gel (např. Granudacyn® gel).

Některá antiseptika snižují účinnost Granuloxu. Proto je doporučováno volit oplachové roztoky na bázi kyseliny chlorné, jako např. Granudacyn®.

Jak používat Granulox®

1. 360° použití

- ✓ Můžete aplikovat všemi směry z jakékoliv pozice, zejména na těžko přístupná místa.

2. Sprej není nutné protřepávat

- ✓ Granulox® si zachovává stále stejnou konzistenci, takže není nutné lahvičku před použitím protřepávat. V průměru vystačí sprej na 30 aplikací a obsah se spotřebuje z 99%.

3. Při prvním použití může dojít k nepřetržitému postřiku.

- ✓ Při prvním použití se může stát, že aplikace spreje pokračuje, i když už trysku nemačkáte. Je to dáno velmi úzkou konstrukcí trysky. Pokud k tomu dojde, jednoduše trysku jemně nakloňte dozadu, zpět dopředu a lehce ji povytáhněte nahoru. Aplikace spreje se tak zastaví.
- ✓ Před prvním použitím Granuloxu proto doporučujeme udělat testovací aplikaci na připravený ubrousek nebo do umyvadla.

4. Tryska se může ucpávat

- ✓ Díky velmi úzkému ventilu může občas dojít k ucpání trysky rozprašovače. Pokud k tomu dojde, trysku vyměňte za novou. Balení náhradních trysek je součástí každého balení.
- ✓ a) Jednoduše odstraňte starou trysku tak, že ji uchopíte, potáhnete směrem nahoru a současně pootočíte.
- ✓ b) Novou trysku zatlačte směrem dolů a zároveň s ní lehce otočte.
- ✓ c) Pokud zaznamenáte nepřetržitý únik z rozprašovače, postupujte podle bodu 3, viz výše.

Granulox® - jak funguje



Granulox® dodává kyslík do rány. Hemoglobin, jako jeho aktivní substance, dopravuje do lůžka rány molekuly kyslíku, který podporuje rychlejší hojení.

50%

Až o polovinu zkracuje dobu hojení diabetických vředů.

Po aplikaci Granuloxu začne hemoglobin vychytávat kyslík z okolního vzduchu a opakovaně jej dopravovat na spodinu rány. Takto okysličená tkáň se pak začne rychleji hojit.

Hemoglobin je v ráně aktivní až 72 hodin, proto je doporučeno provádět převazy včetně nové aplikace Granuloxu každý třetí den. V případě větší produkce exsudátu, kdy je nutné měnit krytí častěji, lze samozřejmě interval mezi aplikacemi Granuloxu zkrátit.

V případě infikované rány lze použít také v kombinaci s antimikrobiálním krytím se stříbrem.



V případě ran souvisejících s onkologickým onemocněním se před použitím Granuloxu poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Velikosti a forma balení

Název	Velikost	Balení
Granulox® Hemoglobinový sprej	12 ml	sprej

- ✓ K dostání v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb
- ✓ **V určených indikacích může Granulox® předepsat i lékař** (u chronických, stagnujících nebo špatně se hojících ran). V takovém případě je produkt **plně hrazen zdravotními pojišťovnami**.

Granulox® podporuje a urychluje hojení širokého spektra ran, jako jsou bércové vředy, vředy diabetických nohou, popáleniny, proleženiny, infikované rány.

Podporuje také rychlé hojení akutních poranění a pooperačních ran.

Obsahuje čištěný hemoglobin, který zlepšuje oxykličení rány.

Více informací najdete na
www.molnlycke.cz
www.osetreniran.cz



Složení: 10% karbonylovaný hemoglobin, 0,7% fenoxyetanol, 0,9% chlorid sodný, 0,05% N-acetylcystein a voda



Granulox® je zdravotnické prostředky III. třídy. Před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem a čtěte pozorně Návod k použití.

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hajkova 22,
130 00 Praha 3. tel. +420221890511.
Mölnlycke Health Care a Granulox jsou
registrované názvy a loga jedné či více společností
skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2023 Mölnlycke Health Care AB.
Všechna práva vyhrazena. CZWC1490223


Mölnlycke®
Váš partner v hojení ran