

Pro každodenní péči o jizvy

Mepiform®

Výhody náplasti Mepiform®:

- ✓ Udržuje jizvu vláčnou a hydratovanou
- ✓ Není potřeba další fixace
- ✓ Dá se upravit na požadovaný tvar a rozměr
- ✓ Snadná aplikace, stačí jen nalepit
- ✓ Tenká a přizpůsobivá
- ✓ Tělová barva zaručuje maximální diskretnost
- ✓ Nebrání každodenním aktivitám
- ✓ Chrání jizvu před UV zářením
- ✓ Prodyšná, voděodolná, umožňuje denní hygienu
- ✓ Může se opakovaně odlepovat a nalepovat
- ✓ Při snímání nedochází k poškození okolní kůže
- ✓ Jeden kus lze používat až 2 týdny nebo dokud drží na místě

Jak Mepiform® používat:

1. Před použitím se ujistěte, že rána je již kompletně zhojená.
2. V případě potřeby náplast zastříhnete na požadovaný tvar a velikost.
3. Nalepte na jizvu tak, aby náplast na všech stranách přesahovala alespoň o 1 cm.
4. Pro co nejlepší výsledky noste Mepiform® na jizvě celý den.
5. Celková doba terapie většinou trvá 2-4 měsíce.

Jemná silikonová náplast na řešení starých i nových jizev

Dostupné velikosti

Velikost	Počet ks v balení
5 x 7,5 cm	5
10 x 18 cm	5
4 x 30 cm	5



Voděodolná



Dá se stříhat



UV ochrana



K dostání v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. V určených indikacích může tento produkt předepsat i lékař. V takovém případě jsou produkty plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.



www.molnycke.cz
www.osetreniran.cz

Mepiform® je zdravotnický prostředek. Před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem a čtěte pozorně Návod k použití.

Mölnlycke Health Care s.r.o.,
Hájkova 22, 130 00 Praha 3, tel. +420221890511.
Mölnlycke Health Care a Mepiform jsou registrované názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2022 Mölnlycke Health Care AB.
Všechna práva vyhrazena.
CZWC0020722



Mölnlycke®
Váš partner v hojení ran

Mepiform®

Jemná silikonová náplast na řešení starých i nových jizev



Pro každodenní péči o jizvy

Po každém poranění kůže se vytvoří jizva. Některé jizvy téměř nejsou vidět, ale jiné mohou být velmi výrazné. To, jak se jizva zhojí a její výsledný vzhled, je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Důležitá je také následná péče o jizvu.

Mepiform® pomáhá zlepšit výslednou podobu starých i nových jizev a snižuje riziko hypertrofie jizvy a vzniku keloidů.

Mepiform® je tenká náplast se silikonem, která slouží ke zmírnění viditelnosti jizev. Může se použít také jako prevence hypertrofie na čerstvé jizvy po chirurgických výkonech, plastických operacích, popáleninách nebo císařském řezu.

Jemně přilne k pokožce a dá se stříhat a upravit na požadovaný tvar.



Zdravotnický prostředek

CE 2797


Mölnlycke®
Váš partner v hojení ran

Mepiform®

SafetaC
TECHNOLOGY




Jizvy nelze nikdy definitivně odstranit. Mepiform® však prokazatelně zlepšuje stav a výslednou podobu jizvy.

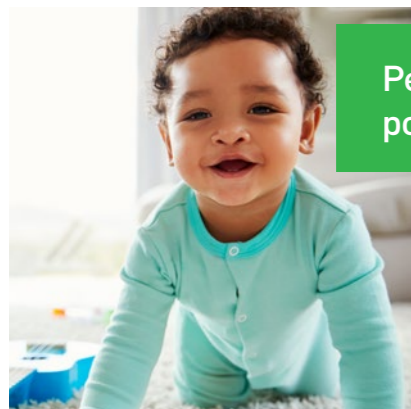

Péče o jizvy po popáleninách

Jizvy po popáleninách jsou obzvláště citlivé. Mepiform® chrání tuto jemnou tkáň před sluncem a ultrafialovým zářením nebo náhodným dotykem. A díky patentované technologii Safetac® lze náplast odlepit, vyčistit nebo zkontrolovat jizvu a opět nalepit.


- ✓ Chrání nově vytvořenou pokožku
- ✓ Chrání jizvu před UV zářením
- ✓ Výměna náplasti je bezbolestná a nehrozí poškození
- ✓ Voděodolná, umožňuje denní hygienu

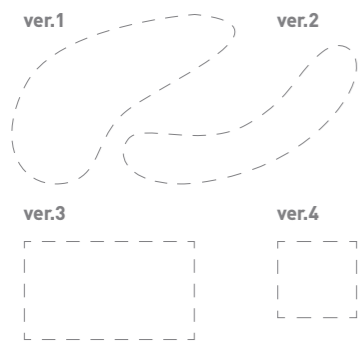

Péče o jizvy po operacích

Po operaci obličeje může být Mepiform® použit jako profylaktická terapie na uzavřené rány pro prevenci hypertrofických nebo keloidních jizev. Díky technologii Safetac® se Mepiform® jemně přizpůsobí konturám obličeje. Náplast si přizpůsobte tvaru a místu výskytu jizvy a nechte ji působit celý den, aby byla jizva chráněna před slunečním zářením.


- ✓ Chrání před vznikem keloidu
- ✓ Chrání jizvu před UV zářením
- ✓ Voděodolná, umožňuje denní hygienu
- ✓ Použití 24 h denně
- ✓ Může se opakovaně odlepovat a nalepovat

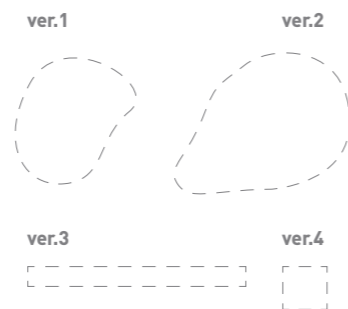

Péče o jizvy po plastické operaci

Jednou z výhod náplasti Mepiform® je, že se dá stříhat a tvarovat. Díky tomu je ideální např. po plastických operacích prsou, kdy jsou jizvy blízko podpaží nebo na rozhraní prsou a trupu. Silikonový plátek zastříhnete do zakřiveného tvaru, viz obrázky, aby dokonale pokryl požadovanou plochu.


- ✓ Jizvu vyhladí, změkčí a zesvětlí
- ✓ Zabraňuje vysychání jizvy
- ✓ Urychluje její vyžívání
- ✓ Jeden kus lze používat až 2 týdny nebo dokud se neodlepi

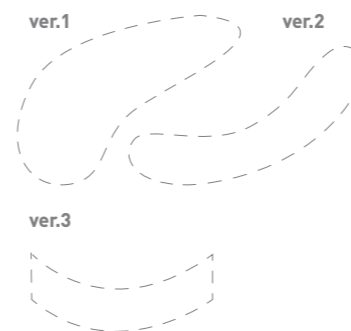

Péče o jizvy po císařském řezu

Pro co nejlepší výsledky hojení po císařském řezu je důležité, aby byla náplast Mepiform® nalepena v jednom kuse, bez jakýchkoli mezer a přesahů. Náplast se dobře přizpůsobí konturám těla a pro pacientky je tak velmi pohodlná i v oblastech, kde kalhoty nebo spodní prádlo mohou dráždit.

- ✓ Poskytuje komfort i pod spodním prádlem
- ✓ Voděodolná, umožňuje denní hygienu
- ✓ Použití 24 h denně
- ✓ Může se opakovaně odlepovat a nalepovat

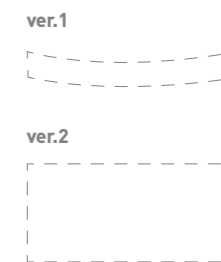

Mepiform se aplikuje výhradně na suchou kůži. Lze kombinovat s tlakovými masážemi.



Pro prevenci vzniku nadměrného zjizvení by se měl Mepiform® začít používat co nejdříve po zhojení rány. Ideálně ihned po odstranění stehů.